



Při vyjímání vnitřní výplně z potahu dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození celistvosti výplně či jednotlivých nopů přetržením silou! Netahejte silou za viscoelastickou hmotu jádra nebo za 3D nopy!

Výplň sedačky lze opláchnout vlažnou vodou a nechat **důkladně proschnout**.

Nikdy neperte vnitřní části sedačky (výplň) v pračce!

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Antidekubitní sedačku skladujte výhradně v horizontální poloze na suchém a stinném místě (+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji vahou v době, kdy nebude používána.

Výrobce garantuje správnou funkčnost a deklarované vlastnosti antidekubitní anatomické sedačky při obvyklém užívání po dobu 36 měsíců. Po uplynutí této lhůty dochází k nenávratným funkčním změnám výrobku a **nelze zaručit deklarované vlastnosti této zdravotní pomůcky, proto doporučujeme antidekubitní anatomickou sedačku přestat používat a nahradit ji novým výrobkem**, předejdete tak možným následným zdravotním problémům.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti zlikvidujte podle platných předpisů nakládání s odpady.

SERVIS A OPRAVY

V případě poškození nebo vyskytnutí závady na sedačce, kontaktujte prodejce. Nepoužívejte poškozenou nebo jinak nefunkční antidekubitní sedačku, nepokoušejte se sedačku opravit!

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky.

Záruka se nevztahuje:

- na poškození vzniklá vlivem nesprávného použití a nesprávnou manipulací s částmi výrobku
- opotřebení, způsobené obvyklým užíváním
- na vady a poškození způsobené neodborným zásahem jiného subjektu

Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé použitím tohoto výrobku v rozporu s návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.



Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.

Výrobce:

SITIN LAB s.r.o., č.p. 28, 533 11 Zdechovice, Česká republika
info@geminisystem.cz, www.geminisystem.cz

Návod k použití



GEMINI SPIN

GEMINI VS / VSC, tvrdost A, B, C, D



Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě s Nařízením (EU) MDR 2017/745 v platném znění a ve shodě s legislativními požadavky ČR na zdravotnické prostředky v platném znění.



Datum vydání: červenec 2020

Datum poslední revize návodu: 30. 5. 2022



POPIS

Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC je zdravotnický prostředek určený primárně k prevenci následků dlouhodobého sezení s rizikem vzniku dekubitů ve střední rizikové skupině.

Sedačka je tvořena výplní ze speciální odolné viscoelastické pěny s paměťovým efektem. Samotné jádro má vrchní vrstvu tvořenou sítí tzv. 3D nopů. Viscoelastická pěna postupně měkne vlivem tlaku a tepla lidského těla, v tu chvíli 3D nopy zvyšují komfortu sedu optimálním rozložením váhy těla uživatele, absorbují deformaci a především umožňují proudění vzduchu v horizontální rovině. 3D nopy zároveň eliminují střížné síly a tření způsobené pohybem uživatele na sedačce, čímž zabráňují negativnímu působení tlaku na pokožku a podkožní tkáň. Spodní základnu výplně tvoří tvrzený pěnový polyetylen (PE) s příčnými kanálky pro odvod tepla a vlhkosti. Jádro sedačky je vertikálně perforováno, což umožňuje vertikální proudění vzduchu a odvod tělesné vlhkosti.

Potah tvoří v sedací části 3D tkanina se spodní vrstvou se speciální termoregulační složkou Outlast®. Tato hi-tech technologie poskytuje textilním materiálům schopnost proaktivní regulace tělesné teploty (absorpce nebo výdej tepla). Boční část potahu je tvořena 3D prodyšnou tkaninou, v přední části s úchopem pro přenášení sedačky a reflexními poutky po obvodu pro lepší uchopení sedačky a zvýšení bezpečnosti. Spodní část potahu sedačky tvoří protiskluzná síťovaná tkanina eliminující posouvání antidekubitní sedačky po povrchu sedáku (např. vozíku).

Antidekubitní sedačky GEMINI SPIN se vyrábí ve 2 typech - typ VS a typ VSC. Oba typy se liší profilem sedací části. Typ VS je rovný, typ VSC je konturovaný se zvýrazněnou abdukční a addukční částí. Sedačka se vyrábí ve čtyřech variantách tvrdosti použité výplně.

Rozměry (šířka a délka) jsou předmětem objednávky uživatele, většinou kopírují rozměry sedu vozíku či zařízení, kde bude použita.



INDIKACE

Lidé s poškozením míchy jsou různě náchylní k tvorbě otlaků a může se stát, že nerozpoznají hrozící nebezpečí vzniku kožního defektu včas. Proto se této skupině uživatelů doporučuje použití preventivních pomůcek - jako jsou mimo jiné i antidekubitní sedačky. Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC je určena především pro osoby se sníženou pohyblivostí a dlouhodobým setrváním v poloze v sedu (na invalidním vozíku, v kočárku apod.). Dekubity se nejvíce vyskytují na sedacích hrbolech, kostrči, a na bocích. Preventivní použití antidekubitní sedačky se doporučuje i lidem s poruchou výživy z důvodu kachexie (výrazně snížená hmotnost) či naopak obezity, dále lidem se špatnou nebo nedůslednou hygienou, s omezenou mírou

zodpovědnosti za péči o exponovaná riziková místa. Antidekubitní sedačka GEMINI SPIN VS/VSC je ideální výrobek pro prevenci tvorby dekubitů a otlaků při dlouhodobém sezení v tzv. střední třídě rizika vzniku dekubitů. **Je nutné si uvědomit, že v prevenci vzniku dekubitů je důležité kombinovat všechny dostupné a adekvátní prostředky a aktivity, které riziko vzniku dekubitů minimalizují!**

FUNKCE

- **antidekubitní vlastnosti:**
 - prevence vzniku dekubitů
 - prevence vzniku intertriga
- **horizontální i vertikální odvětrávání** včetně odvodu vlhkosti a tepla z oblasti sedu (**eliminace vlhkosti**)
- prevence **mechanického poškození tkání sedacích částí těla (eliminace střížných sil)**
- **rovnoměrné rozložení váhy těla** a správné prokrvení pokožky (**eliminace tlaku**)
- speciální potah pomáhá **regulovat tělesnou teplotu** v oblasti sedu za použití textilního materiálu Outlast® (**eliminace tepla**)

VÝBĚR SPRÁVNÉ NOSNOSTI (tvrdosti)

Sedačka je vyráběna ve několika nosnostních kategoriích. **Pro správnou funkci vrstvy 3D nopů je velmi důležité používat odpovídající hmotnostní kategorii výplně (jádra) sedačky, přičemž maximální hmotnost uživatele je 110 kg.** Se správným výběrem vám pomůže specialista prodejce, rehabilitační odborník nebo lékař.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Sedačka je určena k užívání **výhradně pro 1 osobu** (z hygienických i funkčních důvodů). Před použitím sedačky konzultujte její vhodnost a typ provedení (tvrdost) s ošetřujícím lékařem. Pročtěte si návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte dodavatele.

Správná funkce antidekubitní sedačky je zaručena pro použití v teplotním rozmezí -10 až +40 °C, pokud je obsazena uživatelem.

Sedačku nenechávejte dlouhodobě uskladněnou na mrazu nebo přímém slunci! V mrazivém počasí neobsazená sedačka tvrdne, naopak na slunci může změkknout. Tato vlastnost viscoelastické pěny nemá vliv na další používání, ani vlastnosti sedáku.

Nepoužívejte poškozenou sedačku - zkontrolujte potah, protiskluznou vrstvu a pohmatem také vnitřní funkční část. Antidekubitní sedačku správně a stabilně umístěte na sedák (např. vozíku) protiskluznou vrstvou dolů. Přesvědčte se, že velikost antidekubitní sedačky odpovídá velikosti sedačky vozíku.

Potah sedačky je obecně velmi dobře odolný proti otěru. **POZOR!** Vrchní a boční 3D tkanina potahu je však velmi náchylná na otrpání při styku se zhrhodavly (suchý zip). **Vyvarujte se proto přímému kontaktu zhrhodavly s vrchní a boční částí potahu sedačky.**

Antidekubitní sedačka není vyrobena z nehořlavého materiálu! Vyvarujte se používání otevřeného ohně v blízkosti sedačky! Dbejte zvýšené opatrnosti při kouření!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Tak jako všechny exponované části výrobků, také antidekubitní sedačka postupem času podléhá opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě používání.

Menší znečištění:

Sedačku pravidelně zbavujte prachu a usazených nečistot (vyklepáním nebo vysavačem). Při menším uspinění očistěte potah vlhkým hadrem, jemnou houbičkou nebo velmi jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného mycího prostředku. Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní a silné dezinfekční přípravky nebo páru! (Před použitím čistícího prostředku si přečtěte pozorně návod konkrétního čistícího přípravku!)

Větší znečištění:

Potah podložky je možné sejmout a následně prát. Perte maximálně na 40 °C a nepoužívejte aviváž. **Potah nežehelete!** Nechte volně prochnout.